



BG Analytics®

Protokół weryfikacji systemu

 BGA007

G_2013 Rev2 2022-01-26



124 Bernard E. Saint Jean Drive • E. Falmouth, MA 02536 USA

Telephone: (508) 540-3444
Toll-Free: (888) 395-2221
Fax: (508) 540-8680
Technical Support: (800) 848-3248
Customer Service: (800) 525-8378

Opisywany produkt jest przeznaczony do diagnostyki in vitro. Może być stosowany wyłącznie przez profesjonalnych użytkowników. Instrukcję stosowania w różnych językach zamieszczono na stronie www.acciusa.com

© Copyright 2022, Associates of Cape Cod, Inc., wszelkie prawa zastrzeżone. G_2013 Rev.2

Niniejszy dokument został opracowany dla klientów i upoważnionego personelu Associates of Cape Cod, Inc. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są zastrzeżone. Bez wyraźnego, pisemnego zezwolenia Associates of Cape Cod, Inc. instrukcja nie może być kopiowana, reprodukowana, tłumaczona ani transmitowana w jakiegokolwiek formie.

G_2013 Rev2

Microsoft®, Microsoft® .NET, Windows® 10 są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w USA oraz/lub innych krajach.

Windows® i logo Windows są znakami grupy spółek Microsoft.

BG Analytics® i Fungitell STAT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Associates Cape Cod, Inc.

8-studzienkowy czytnik z funkcją inkubacji Lab Kinetics jest instrumentem produkowanym przez Lab Kinetics LLC.

Treść

1	Opis.....	5
1.1	Cel	5
2	Plan weryfikacji systemu.....	5
2.1	Zakres.....	5
2.2	Opis elementów poddawanych testowi.....	6
2.3	Wymagana specyfikacja	8
2.4	Plan weryfikacji systemu dla laboratorium	9
2.5	Zakresy obowiązków	9
2.6	Lista materiałów potrzebnych do przeprowadzenia niniejszego Protokołu weryfikacji systemu. 11	
2.7	Procedura.....	12
2.8	Kryteria akceptacji.....	13
2.9	Lokalizacja ukończonego Protokołu weryfikacji systemu	13
2.10	Ocena i zatwierdzenie	13
3	Kwalifikacja instalacji 8-studzienkowego czytnika probówek z funkcją inkubacji Lab Kinetics	14
3.1	Zadanie testowe Dokumentacja kalibracji	14
3.2	Konfiguracja 8-studzienkowego czytnika probówek z funkcją inkubacji Lab Kinetics	14
3.3	Instalacja 8-studzienkowego czytnika probówek z funkcją inkubacji Lab Kinetics	15
3.4	Zadanie testowe Ocena 8-studzienkowego czytnika probówek z funkcją inkubacji Lab Kinetics 16	
3.5	Zadanie testowe Weryfikacja temperatury 8-studzienkowego czytnika probówek z funkcją inkubacji Lab Kinetics	17
3.6	Zadanie testowe Weryfikacja intensywności cyfrowej 8-studzienkowego czytnika probówek z funkcją inkubacji Lab Kinetics	18
3.7	Ocena i zatwierdzenie	19
4	Kwalifikacja instalacji oprogramowania BG Analytics®	20
4.1	Instalacja zadania testowego oprogramowania BG Analytics®	20
4.2	Zadanie testowe Instalacja czytnika kodów paskowych.....	21
4.3	Ocena i zatwierdzenie	22
5	Kwalifikacja działania 8-studzienkowego czytnika probówek z funkcją inkubacji Lab Kinetics i oprogramowanie BG Analytics®	23
5.1	Zadanie testowe Weryfikacja przesyłu danych	23

5.2	Zadanie testowe Weryfikacja gromadzenia, zapisywania, analizy i dostarczania wyników testu	24
5.3	Weryfikacja BG Analytics® Zadanie testowe Raportowanie wyników testu	26
5.4	Zadanie testowe Weryfikacja przechowywania danych i możliwości wyszukiwania	29
5.5	Zadanie testowe Weryfikacja możliwości sporządzenia kopii zapasowej bazy danych	30
5.6	Ocena i zatwierdzenie	31
6	Końcowy raport weryfikacyjny	32
6.1	Końcowy raport weryfikacyjny	32
6.2	Ocena i zatwierdzenie	33
7	Załączniki	34
7.1	Dokumentacja szkoleń	34
7.2	Obiektywne dowody	35
7.3	Dodatkowe testy	36
7.4	Nr raportu dotyczącego rozbieżności	37
7.5	Raport dotyczący rozwiązywania problemów	38
7.6	Konserwacja	39

1 Opis

1.1 Cel

Opisywany Protokół weryfikacji systemu służy do sprawdzania czy system (przy czym system składa się z 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji oraz oprogramowania BG Analytics® zainstalowanego w komputerze-goście) wykonuje wymagane działania precyzyjnie i niezawodnie. Dokładniej rzecz biorąc, poszczególne zadania testowe (określane także numerem TC), opisywane w niniejszym Protokole weryfikacji systemu, mają wykazywać, dokumentować, oceniać i potwierdzać, że system działa zgodnie z zamierzeniami.

W niniejszym Protokole są stosowane następujące skróty nazw produktów:

- **Instrument PKF08** (lub **PKF08**) oznacza 8-studzienkowy czytnik próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics
- **BGA** lub **BG Analytics®** oznacza oprogramowanie BG Analytics®
- **Fungitell STAT®** oznacza test do oznaczania (1--3)-β-D-glukanu Fungitell STAT® (1,3)-B-D-Glucan Detection Assay

Przetłumaczone wersje niniejszego Protokołu weryfikacji systemu można pobrać z: www.acciusa.com.

2 Plan weryfikacji systemu

2.1 Zakres

Zakres Protokołu weryfikacji systemu PKF08 i BGA określa przebieg procedury, zgodnie z którą będzie przeprowadzana weryfikacja zgodności działania instrumentu PKF08 i oprogramowania BG Analytics® z przyjętym celem. W Wymaganej specyfikacji podano cel i funkcje, które musi spełniać instrument i oprogramowanie, tak jak zdefiniowano w punkcie dotyczącym potrzeb użytkownika. Zgodnie z niniejszym Protokołem weryfikacji systemu, każdą Wymaganą specyfikację należy poddać testowi według predefiniowanych Zadań testowych, opisanych w rozdziałach Kwalifikacja instalacji oraz Kwalifikacja działania. Każde gotowe Zadanie testowe zawiera formalną dokumentację Wyników oczekiwanych i Wyników obserwowanych. Końcowy raport weryfikacyjny zawiera opis stanu zrealizowanych Zadań testowych i formalną informację, czy system działa zgodnie z Wymaganą specyfikacją.

Protokół weryfikacji systemu jest podzielony na następujące rozdziały:

- **Rozdział 3, Kwalifikacja instalacji 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics**, zawiera potwierdzenie, że instrument PKF08 został zainstalowany zgodnie ze specyfikacją producenta oraz że zostały przeprowadzone i udokumentowane testy funkcjonalne, które przyniosły oczekiwane wyniki.
- **Rozdział 4, Zatwierdzenie instalacji oprogramowania BG Analytics®**, zawiera potwierdzenie, że oprogramowanie zostało zainstalowane zgodnie ze specyfikacją producenta oraz że zostały przeprowadzone testy funkcjonalne, które udokumentowano jako zgodne z oczekiwanymi rezultatami.
- **Rozdział 5, Zatwierdzenie działania 8-studzienkowego czytnika z funkcją inkubacji Lab Kinetics i oprogramowania BG Analytics® Software**, zawiera potwierdzenie, że działanie systemu mieści się w wyznaczonym zakresie i granicach tolerancji.
- **Rozdział 6, Końcowy raport weryfikacyjny**, zawiera opis odpowiednich Zadań testowych i ich wyników oraz ostateczną ocenę stanu systemu.
- **Rozdział 7, Załączniki**, zawiera dokumentację przeprowadzanych szkoleń osoby testującej, obiektywne materiały dowodowe, dodatkowe testy oraz Raport rozbieżności i Raport dotyczący rozwiązywania problemów a także Dokumentację konserwacji.

Spółka Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) dostarcza wskazówek, służy swoją wiedzą i doświadczeniem oraz udziela na miejscu pomocy przy weryfikacji działania 8-studzienkowego czytnika z funkcją inkubacji Lab Kinetics i oprogramowania BG Analytics®. Za sprawdzenie, czy zakres Protokołu weryfikacji systemu jest zgodny z lokalnymi wymaganiami, potrzebami i oczekiwaniami będzie odpowiadać Osoba upoważniona (reprezentująca laboratorium). Osoba ta może także dodatkowo modyfikować Plan weryfikacji systemu. Podrozdział 2.4, Planu weryfikacji systemu w Laboratorium (Tabela 4) należy

używać do formalnego dokumentowania planu przeznaczonego do konkretnego laboratorium, w którym ma być na stałe umieszczony system.

W razie rozbieżności dotyczących Procedury, Wyników oczekiwanych lub Wyników obserwowanych w określonym Zadaniu testowym, do udokumentowania problemu należy użyć Raportu rozbieżności. Raport rozbieżności powinien zawierać następujące elementy: odniesienie do Zadania testowego, numer raportu, opis rozbieżności oraz ich badania i sposobu rozwiązania problemu, a także informacje o kategorii rozwiązania.

W przypadku negatywnego rezultatu Zadania testowego, może on zostać powtórzony po odpowiednim udokumentowaniu problemu w Raporcie rozbieżności. Do udokumentowania procedury powtórzenia Zadania testowego należy użyć wstępnie zatwierdzonego Raportu dotyczącego rozwiązania problemu. Raport dotyczący rozwiązania problemu powinien zawierać następujące informacje: odniesienie do Zadania testowego, opis problemu, działania naprawcze, wyniki oczekiwane i wyniki obserwowane.

Szablony Raportu rozbieżności, Raportu dotyczącego rozwiązania, dodatkowych testów i konserwacji w wersji elektronicznej są dostępne na żądanie.

2.2 Opis elementów poddawanych testowi

W ramach niniejszego Protokołu weryfikacji systemu testowane będą trzy elementy.

2.2.1 8-studzienkowy czytnik próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics

Instrument PKF08 jest absorpcyjnym czytnikiem z funkcją inkubacji, wyposażonym w 8 (osiem) studzienek. Każda studzienka jest odczytywana oddzielnie i dla każdej z nich z osobna mierzony jest czas, zbieranie danych rozpoczyna się natychmiast po włożeniu próbki reakcyjnej. Instrument PKF08 został zaprojektowany tak, aby osiągał temperaturę $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ i utrzymywał tę temperaturę przez 10 minut inkubacji oraz przez trwający 40 minut okres oznaczania. Wartości cyfrowe są zbierane przy dwóch długościach fali: 405 nm (podstawowa) i 495 nm (dodatkowa), a następnie są przesyłane z instrumentu PKF08 do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem BG Analytics[®]. Instrument PKF08 jest przeznaczony do próbek o średnicy 12 mm. Do przygotowania próbek i wstępnej obróbki w czasie inkubacji można używać niepirogennych próbek 12x75 mm ze szkła borokrzemowego. Szczególnie ważne jest jednak, aby do oznaczenia używać płaskodennych próbek 12x65, które są dostarczane z odczytnikiem Fungitell STAT[®],

W Tabeli 1 podano wymagania dotyczące warunków w środowisku w trakcie działania PKF08. Więcej informacji zamieszczono w Instrukcji stosowania 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics (Instrukcja stosowania kinetycznego, 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji), która jest dostarczana w formie papierowej wraz z instrumentem PKF08 (można ją także pobrać z www.acciusa.com).

Tabela 1. Wymagane warunki środowiskowe w czasie pracy instrumentu PKF08

Wymagane warunki środowiskowe w czasie pracy PKF08	Opis
Warunki w laboratorium	Płaskie i stabilne podłoże, z dala od urządzeń, które mogłyby powodować nadmierne wibracje lub zakłócenia elektroniczne Należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego
Temperatura otoczenia	15°C – 30°C
Wilgotność otoczenia	< 70%
Zasilanie	100-240 VAC @ 50/60 Hz
Podłączenia do gniazda zasilania	Kondycjoner sieciowy (dostarczany wraz z instrumentem PKF08) Zasilacz awaryjny (UPS) (opcjonalny)

2.2.2 Oprogramowanie BG Analytics®

Wartości cyfrowe wysyłane przez instrument PKF08 są odbierane przez oprogramowanie BG Analytics®, które przetwarza te wartości na wartości gęstości optycznej (OD). Redukcja danych polega na obliczeniu współczynnika (nachylenia krzywej) na podstawie różnicy wartości OD danych kinetycznych (405 – 495 nm) przez dopasowanie regresji liniowej w zakresie między 1900 a 2400 sekund.

Oprogramowanie BG Analytics® zapisuje zebrane dane w lokalnej, nieudostępnionej bazie danych SQLite, określanej jako baza danych BG Analytics. Baza danych umożliwia wyszukiwanie na podstawie kilku kryteriów. Więcej danych można znaleźć w Instrukcji obsługi G_1867 BG Analytics®.

Oprogramowanie BG Analytics® należy instalować w kompatybilnym komputerze - hoście, spełniającym wymagania minimalne opisane w Tabeli 2.

Tabela 2: Minimalne wymagania systemowe wobec komputera hostującego oprogramowanie BG Analytics®

Wymagania systemowe wobec komputera hosta	Opis
System operacyjny	Microsoft® Windows® 10 64 bitów, wersja 1809 lub późniejsza
Pamięć fizyczna	Minimum: 4 GB Zalecana: 8 GB
Miejsce na twardym dysku	Minimum: 10 GB Zalecane: 15 GB i więcej
Porty komunikacyjne	Co najmniej jeden wolny port USB port (lub 2 (dwa), jeśli używany jest czytnik kodów paskowych)

Dodatkowe wymagania:

- Konto użytkownika Microsoft® Windows
 - Oprogramowanie BG Analytics® jest instalowane w komputerze hoście z bazą danych SQLite odpowiednio do konta użytkownika:
 - Można użyć wspólnego dla całego laboratorium konta użytkownika Microsoft® Windows.
 - Jeśli ma być używanych wiele kont użytkownika Microsoft® Windows, BGA należy zainstalować indywidualnie dla każdego z nich.
- Połączenie z czytnikiem kodów paskowych (opcjonalne)
 - Oprogramowanie BGA opracowano tak, aby zapewnić kompatybilność z wszystkimi czytnikami kodów paskowych, które zostały skonfigurowane w trybie czytnika punktu sprzedaży USB HID. Na przykład czytniki przewodowe do zastosowań w ochronie zdrowia Honeywell (np. Honeywell PN 1950HHD, Honeywell 1950HSR). Dodatkowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi czytnika kodów paskowych.
- Połączenie z drukarką
- Informacje dotyczące oprogramowania antywirusowego
 - Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie w komputerze hostującym BG Analytics® programu antywirusowego w najnowszej, zaktualizowanej wersji. ACC zaleca, aby stosować się do polityki bezpieczeństwa lokalnych laboratoriów.

2.2.3 Test Fungitell STAT®

Za pomocą oprogramowania BG Analytics® porównuje się nachylenie krzywych dla próbki i wzorca, co pozwala uzyskać wartość wskaźnika. Wartości wskaźnika są zaliczane do odrębnych kategorii wyników: ujemnych

nieokreślonych lub dodatnich, odpowiednio do zakresów kategorii wartości wskaźników, zamieszczonych w Tabeli 3. Więcej informacji można uzyskać w Instrukcji stosowania (PN002603) Fungitell STAT®.

Tabela 3. Zakresy wartości wskaźnika, tak jak podano w Instrukcji stosowania Fungitell STAT®

Wyniki testu Fungitell STAT® podlegające zgłoszeniu	
Wynik	Wartość wskaźnika
Ujemny	≤ 0,74
Nieokreślony	0,75 – 1,1
Dodatni	≥ 1,2

Uwaga: test Fungitell STAT® jest przeznaczony do diagnostyki in vitro surowicy pacjentów. Z tego powodu zaleca się, aby testy przeprowadzać w szafce bezpieczeństwa biologicznego, zwiększa to bezpieczeństwo operatora w czasie pracy z próbkami klinicznymi. Niniejszy Protokół weryfikacji systemu nie dotyczy wykorzystywania próbek klinicznych, zaleca się jednak, aby Protokół przeprowadzać w zgodnych z zamierzonym zastosowaniem warunkach środowiskowych, a zatem wewnątrz szafki bezpieczeństwa biologicznego.

2.3 Wymagana specyfikacja

Wymaganą specyfikację 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji i oprogramowania BG Analytics® podano poniżej.

- Przed instalacją w laboratorium instrument PKF08 musi zostać wykalibrowany w ACC.
- Instrument PKF08 musi zostać zainstalowany zgodnie z wymaganiami producenta i podaną specyfikacją warunków otoczenia.
- Instrument PKF08 musi utrzymywać temperaturę 37°C ± 1°C.
- W instrumencie PKF08 intensywność cyfrowa pustych studzienek musi wynosić przy obu długościach fali, 405 i 495 nm, co najmniej 36 000 jednostek.
- Instrument PKF08 musi być w stanie przesyłać dane do BG Analytics® przy podanych długościach fal, 405 nm and 495 nm, w tym dane o temperaturze inkubacji.
- W laboratorium musi być zainstalowane zgodnie z wymaganiami oprogramowanie BG Analytics®.
- BG Analytics® musi akceptować odczynnik Fungitell STAT®, wzorzec Fungitell STAT®, LRW, APS oraz identyfikatory pacjentów, jeśli jest stosowany czytnik kodów paskowych.
- Przy używaniu wraz z testem Fungitell STAT® jako pomocy w diagnostyce klinicznej zakażenia grzybami inwazyjnymi, instrument PKF08 i oprogramowanie BG Analytics® muszą zbierać i analizować dane, a po zakończeniu testu zapisywać je we wbudowanej bazie danych.
- Pod koniec testu BG Analytics® musi wyświetlać na ekranie wynik testu próbki pacjenta.
- Jeśli jako kontrolę ujemną stosuje się LRW, BG Analytics® musi wyświetlać wynik jakościowy ujemny lub wynik nieważny.
- Gy zostaną stwierdzone nieprawidłowe warunki jakościowe BG Analytics® musi wyświetlać ślad kinetyczny próbki.
- BG Analytics® musi tworzyć możliwości wydrukowania i eksportowania raport z jednym identyfikatorem próbki na stronę.
- BG Analytics® musi stwarzać możliwości przeszukiwania bazy danych według numeru serii standardu, numeru serii odczynnika, identyfikatora próbki i identyfikatora użytkownika.
- BG Analytics® musi umożliwiać sporządzenie kopii zapasowej bazy danych SQLite.

2.4 Plan weryfikacji systemu dla laboratorium

Protokół weryfikacji systemu można realizować w całości, tak jak został opisany lub Osoba upoważniona (jak zapisano w punkcie 2.5.3 Rejestr personelu) może określić i zarejestrować część(-ci) niniejszego Protokołu jako nieznaną(-e) zastosowania (N/A) oraz/lub określić dodatkowe testy, mające na celu spełnienie lokalnych wymagań, potrzeb i oczekiwań. W Tabeli 4 należy zapisać, które części (jeśli jakiegokolwiek) są N/A, a następnie parafować wpis i opatrzyć go datą.

Tabela 4. Plan weryfikacji systemu dla laboratorium

Nr rozdziału	Opis rozdziału	Testowany element	Nie znajduje zastosowania? Parafka/Data
3.	Kwalifikacja instalacji PKF08	8-studzienkowy czytnik próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics	N/D _____
4.	Kwalifikacja instalacji BGA	Oprogramowanie BG Analytics®	N/D _____
5.	Kwalifikacja działania PKF08 i BGA	8-studzienkowy czytnik próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics i oprogramowanie BG Analytics®	<input type="checkbox"/> N/D _____
7.3	Dodatkowe testy	_____ _____ _____	N/D _____

Część(-ci) rejestrowana(-e) jako N/A nie będzie(-a) realizowana(-e) i brana(-e) pod uwagę przy rozważaniu, czy Protokół weryfikacji systemu został uznany za zaliczony w **Rozdziale 6 Końcowego raportu weryfikacyjnego**.

2.5 Zakresy obowiązków

Zakresy obowiązków są określone w następujący sposób:

2.5.1 Sprzedawca

Zgodnie z zamierzeniami Protokół weryfikacji systemu ma być przeprowadzany przez wyszkoloną osobę reprezentującą sprzedawcę. Dane kontaktowe sprzedawcy dostarczającego instrument PKF08, oprogramowanie BG Analytics® oraz testy Fungitell STAT® powinny być wpisane w tabeli 5.

Tabela 5. Dane kontaktowe sprzedawcy

Dane sprzedawcy	
Nazwa: _____	Associates of Cape Cod, Inc.
Adres	124 Bernard E. Saint Jean Drive East Falmouth MA 02536 USA
Nr telefonu	001-508-540-3444
Dane kontaktowe działu pomocy technicznej	e-mail: TechnicalServices@acciusa.com Nr telefonu: 001-888-848-3248
Lokalny autoryzowany sprzedawca	Nazwa: _____ Adres e-mail: Nr telefonu

2.5.2 Laboratorium

Oczekuje się, że Protokół weryfikacji zostanie oceniony i zaakceptowany przez Laboratorium, w którym zostanie na stałe umieszczony system. Dane laboratorium należy zamieścić w Tabeli 6.

Tabela 6. Dane laboratorium

Dane laboratorium	
Nazwa laboratorium	
Nazwa spółki/szpitala	
Adres	
Nr telefonu	
Główna osoba kontaktowa	Imię i nazwisko: _____ Adres e-mail: Nr telefonu

2.5.3 Rejestr personelu

Należy zapisać imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionej osoby (reprezentującej wymienione wyżej laboratorium), odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy dostawy instrumentu PKF08 i oprogramowania BG Analytics® (w tym przeprowadzenie niniejszego protokołu):

Rola: osoba upoważniona		
Nazwisko: _____ -	Stanowisko: _____ _____	Podpis: _____ Data: _____

Należy zapisać nazwisko i stanowisko wszystkich pracowników uczestniczących w realizacji niniejszego Protokołu:

Rola: Tester		
Nazwisko: _____ -	Stanowisko: _____ _____	Podpis: _____ Data: _____
Rola: Kontroler		
Nazwisko: _____ -	Stanowisko: _____ _____	Podpis: _____ Data: _____
Rola: _____		
Nazwisko: _____ -	Stanowisko: _____ _____	Podpis: _____ Data: _____

2.5.4 Dokumentacja szkolenia w zakresie niniejszego Protokołu weryfikacji systemu

W punkcie 7 Załączniki należy udokumentować, że osoby wymienione w punkcie 2.5.3 Pracownicy zarejestrowani jako Testerzy są przeszkoleni w zakresie zawartości niniejszego Protokołu.

2.6 Lista materiałów potrzebnych do przeprowadzenia niniejszego Protokołu weryfikacji systemu.

Listę materiałów potrzebnych do przeprowadzenia niniejszego Protokołu w całości zamieszczono w Tabeli 7. Żadne materiały nie mogą zawierać glukanów, które mogłyby zakłócić przebieg testu. Wyroby szklane muszą zostać poddane trwającej co najmniej 7 godzin depirogenizacji w temperaturze co najmniej 235 °C (lub w zwalidowanych warunkach równoważnych).

Tabela 7. Potrzebne materiały

Materiały	Sprzedawca	Katalog ACC US Numer*	Potrzebna ilość	Warunki przechowywania
8-studzienkowy czytnik probówek z funkcją inkubacji Lab Kinetics i oprogramowanie BG Analytics®	ACC	PKF08-PKG	1	Otoczenie
Zestaw Fungitell STAT® (10 fiolek odczynnikowa STAT + 5 fiolek wzorca STAT)	ACC	FT007	2 zestawy	2 – 8°C
Zasadowy roztwór do obróbki wstępnej (APS)	ACC	APS51-5	1 fiołka	2 – 30°C
Końcówki pipety 250 µl	ACC*	PPT25	1 opakowanie	Otoczenia
Końcówki pipety 1000 µl	ACC*	PPT10	1 opakowanie	Otoczenie
Długie końcówki pipety 20 - 200 µl	ACC*	TPT50	1 opakowanie	Otoczenie
Probówki 12x75 mm poddane depirogenizacji, ze szkła borokrzemowego	ACC	TB240-5	1 opakowanie	Otoczenie
Woda odczynnikowa LAL (LRW)	ACC	W0051-10	1 butelka	2 – 30°C
Statywy na probówki o średnicy 12 mm	Dowolne		2	Otoczenia
Urządzenie mieszające	Dowolne		1	Otoczenie
Parafilm® M	Dowolne		1	Otoczenie
Pipety o regulowanej pojemności 100 - 1000 µl	Dowolne		1	Otoczenie
Pipety o regulowanej pojemności 20 - 200 µl	Dowolne		1	Otoczenie

*Lub równoważne, w zależności od dostępności u regionalnego, autoryzowanego sprzedawcy

2.7 Procedura

Stosować się do przedstawionej procedury, postępując w opisanej kolejności. W każdym rozdziale przedstawiono zadania testowe, aby stworzyć materiał dowodowy potwierdzający, że instrument PKF08 i oprogramowanie BG Analytics® są zgodne z Wymaganą specyfikacją.

- Personel przeprowadzający lub sprawdzający jakąkolwiek część tego Protokołu musi wypełnić Rejestr personelu w punkcie 2.5.3 Rejestr personelu.
- Personel przeprowadzający ten Protokół musi wypełnić wszystkie jego części, z wyjątkiem tych, które w Tabeli 4 są zapisane jako N/A.
- W każdym Rozdziale Osoba upoważniona może określić Zadanie(-a) testowe jako N/A oraz zapisać je i odpowiednio uzasadnić.
- Personel realizujący niniejszy Protokół musi zrealizować wszystkie Zadania testowe w danej części, z wyjątkiem tych, które zostały uznane za N/A.
- Personel przeprowadzający niniejszy Protokół musi zgromadzić obiektywny materiał dowodowy w sposób zgodny z Procedurą każdego Zadania testowego i udokumentować Wyniki obserwowane.
- Personel przeprowadzający niniejszy Protokół musi wydrukować wszystkie obiektywne dowody, tak jak określono w punkcie Oczekiwane wyniki (zrzuty ekranów, raporty itp.), oznaczyć je numerem referencyjnymi i zgromadzić w **Rozdziale 7 Załączniki**.
- Personel przeprowadzający niniejszy Protokół musi udokumentować dla każdego Zadania testowego status ZALICZONY lub NIEZALICZONY (z wyjątkiem Zadań testowych N/A).
- Personel przeprowadzający niniejszy Protokół musi zarejestrować wszystkie rozbieżności w stosunku do Wyników oczekiwanych w Raporcie rozbieżności i zamieścić ten Raport w **Rozdziale 7, Załączniki**.
- Personel przeprowadzający niniejszy Protokół musi rozwiązać problem zgodnie ze wstępnie zatwierdzonym Raportem dotyczącym rozwiązywania problemów i zamieścić Raport w **Rozdziale 7, Załączniki**.
- Osoba upoważniona musi ocenić, podpisać i opatrzyć datą każde Zadanie testowe, w tym obiektywne dowody, Raport rozbieżności oraz Raport dotyczący rozwiązywania problemów (jeśli jest). Raport rozbieżności oraz Raport dotyczący rozwiązywania problemów należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej stanu Zadania testowego, którego dotyczy problem.
- Osoba upoważniona musi zidentyfikować i przygotować zadanie testowe do dodatkowych testów (w razie potrzeby). Zadania testowe do dodatkowych testów należy uwzględnić w **Rozdziale 7, Załączniki**.
- Personel przeprowadzający niniejszy Protokół musi wypełnić, podpisać i opatrzyć datą Podrozdział 6.1 Końcowy raport weryfikacyjny.
- Wszystkie odpowiednie rozdziały niniejszego Protokołu muszą zostać ocenione i zatwierdzone przez dwie Osoby upoważnione.
- Konserwację zweryfikowanego systemu (np. powtórna kalibracja PKF08, czyszczenie bazy danych lub aktualizacja oprogramowania BGA) można przedsięwziąć i zarejestrować w **Rozdziale 7 Załączniki**.
- Osoba upoważniona musi zarchiwizować wypełniony Protokół weryfikacji systemu w lokalizacji wymienionej w punkcie 2.9 Lokalizacja wypełnionego Protokołu weryfikacji systemu.

2.8 Kryteria akceptacji

- Każdy odpowiednie Zadanie testowe musi zostać ZALICZONE, aby zostać uznanym za zgodne z właściwą częścią niniejszego Protokołu. Jedno Zadanie testowe, który zostanie zapisane jako NIEZALICZONE, wskazuje na niezgodność całej części, chyba, że Osoba upoważniona uzna inaczej.
- Zadanie testowe, które zostanie zapisane jako NIEZALICZONE nie może zostać przeprowadzone ponownie bez Raportu rozbieżności oraz Raportu dotyczącego rozwiązania problemu, wstępnie zatwierdzonych przez Osobę upoważnioną i dołączonych do **Rozdziału 7, Załączniki**.
- Aby Protokół weryfikacji systemu mógł zostać ZALICZONY, każdy odpowiedni Rozdział tego Protokołu musi być zgodny z Wymaganą specyfikacją. Decyzję należy zapisać w **Rozdziale 6, Końcowy raport weryfikacyjny**.

2.9 Lokalizacja ukończonego Protokołu weryfikacji systemu

Po zakończeniu i sprawdzeniu Protokół weryfikacji systemu zostanie zarchiwizowany w:

2.10 Ocena i zatwierdzenie

Wypełniony **Rozdział 2**, określony jako **Plan weryfikacji systemu** Protokołu weryfikacji systemu w odpowiedni sposób opisuje w jaki sposób należy udokumentować, że 8-studzienkowy czytnik próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics i oprogramowanie BG Analytics® umożliwiają osiągnięcie zamierzonego celu i spełniają swoje funkcje.

Ocena i zatwierdzenie
<p>_____</p> <p>Podpis: Osoba upoważniona i data</p>
<p>_____</p> <p>Stanowisko: _____</p>
<p>_____</p> <p>Podpis: Osoba upoważniona i data</p>
<p>_____</p> <p>Stanowisko: _____</p>

3 Kwalifikacja instalacji 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics

3.1 Zadanie testowe Dokumentacja kalibracji	
<input type="checkbox"/> Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____	
Cel	Przed instalacją w laboratorium instrument PKF08 musi zostać wykalibrowany w ACC.
Procedura testowa:	Instrument PKF08 jest dostarczany wraz z certyfikatem kalibracji. Dokument ten zawiera dowody na to, że najważniejsze funkcje instrumentu PKF08 zostały skalibrowane zgodnie ze specyfikacją producenta.
Wyniki oczekiwane:	wraz z Instrumentem PKF08 jest dostarczany certyfikat kalibracji.
Wyniki obserwowane:	Certyfikat kalibracji został dostarczony: <input type="checkbox"/> Tak, data kalibracji: _____ <input type="checkbox"/> Nie
Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

3.2 Konfiguracja 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics	
<input type="checkbox"/> Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____	
Cel	Instrument PKF08 musi zostać zainstalowany zgodnie z wymaganiami producenta i podaną specyfikacją warunków otoczenia.
Warunki konieczne:	Otrzymano Instrument PKF08. Prawidłowo zrealizowano TC 3.1.
Piśmiennictwo	Instrukcja obsługi kinetycznego czytnika próbek z funkcją inkubacji
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> Ostrożnie otworzyć opakowanie instrumentu PKF08 i postawić instrument PKF08 na czystej, równej powierzchni. Obejrzeć z zewnątrz instrument PKF08 pod kątem wszelkich oznak uszkodzeń, takich jak zarysowania i zapisać wszystkie obserwacje w części Wyniki obserwowane. Wyjąć z pudełka pozostałe elementy (przewód zasilania, przewód komunikacyjny USB, kondycjoner sieciowy i osłonę przeciwpyłową) i sprawdzić je pod kątem występowania uszkodzeń. Zapisać wszystkie obserwacje w części Wyniki obserwowane. W przypadku braku jakichkolwiek materiałów lub stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z Działem obsługi technicznej pod adresem TechnicalServices@acciusa.com.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> Instrument PKF08 został dostarczony i nie jest uszkodzony. Nie brakuje żadnych elementów i żaden nie jest uszkodzony.

Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> Instrument PKF08 został dostarczony i nie jest uszkodzony: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie, _____ Nie brakuje żadnych elementów i żaden z nich nie jest uszkodzony.
Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

3.3 Instalacja 8-studienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics	
<input type="checkbox"/> <i>Uzasadnienie N/A:</i> _____ <i>Parafka/Data:</i> _____	
Cel	<i>Instrument PKF08 musi zostać zainstalowany zgodnie z wymaganiami producenta i podaną specyfikacją warunków otoczenia.</i>
Warunki konieczne:	Dane identyfikacyjne termometru: Model: _____ Nr seryjny: _____ Termin kal.: _____ Dane identyfikacyjne wilgotnościomierza: Model: _____ Nr seryjny: _____ Termin kal.: _____
Piśmiennictwo	Instrukcja obsługi kinetycznego czytnika próbek z funkcją inkubacji PKF08
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> W części Wyniki obserwowane należy zapisać warunki środowiskowe w laboratorium. Potwierdzić w części Wyniki obserwowane, że warunki środowiskowe spełniają wymagania. Jeśli warunki środowiskowe będą spełniać wymagania, podłączyć instrument PKF08 do uziemionego gniazda ściennego za pośrednictwem dostarczonego kondycjonera sieciowego (i opcjonalnie UPS). Zapisać dane instrumentu PKF08 w części Wyniki obserwowane.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> Warunki środowiskowe są udokumentowane i spełniają wymagania. Informacje o instrumencie PKF08 są udokumentowane. Instrument PKF08 został zainstalowany.
Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> Warunki środowiskowe: <ul style="list-style-type: none"> Temperatura otoczenia: _____ °C (wymagany zakres 15 - 30°C) Wilgotność powietrza w otoczeniu: _____ % (wymagany zakres < 70%) Zasilanie: _____ VAC (wymagane 100-240VAC @ 50/60 Hz) Warunki środowiskowe spełniają wymagania: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie, _____

	<ul style="list-style-type: none"> • Dane instrumentu PKF08: <ul style="list-style-type: none"> ○ Numer seryjny: _____ ○ Podłączenie przez kondycjoner sieciowy: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie <ul style="list-style-type: none"> ○ Marka/Model: _____ ○ Połączenie przez UPS (niekoniecznie): <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie <ul style="list-style-type: none"> ○ Marka/Model: _____ • Instrument PKF08 został zainstalowany: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie
Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

<h3 style="color: #4F81BD;">3.4 Zadanie testowe Ocena 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics</h3>	
<input type="checkbox"/> Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____	
Cel	<i>Instrument PKF08 musi zostać zainstalowany zgodnie z wymaganiami producenta i specyfikacją warunków otoczenia.</i>
Warunki konieczne:	Zadanie testowe TC 3.3 zostało zakończone. Napełnić osiem próbek płaskodennych 12x65 mm (lub równoważnych, np. z niepirogennych próbek 12x75 mm ze szkła borokrzemowego) 1,5 ml LRW.
Piśmiennictwo	Instrukcja obsługi kinetycznego czytnika próbek z funkcją inkubacji
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włączyć PKF08. 2. Poczekać na inicjalizację PKF08. 3. Włożyć próbki 12x75 mm do wszystkich ośmiu studzienek. 4. Obserwować działanie instrumentu PKF08 zgodnie z objaśnieniami w części Wyniki oczekiwane. Udokumentować w części Wyniki obserwowane.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> • Po włączeniu PKF08: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ekran LCD screen jest włączony ○ Na ekranie LCD są wyświetlone numer seryjny i długość fali ○ Diody LED wszystkich pustych studzienek świecą się na czerwono • Po włożeniu próbek 12x75 mm do wszystkich ośmiu studzienek: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wszystkie próbki można prawidłowo włożyć ○ Diody LED wszystkich studzienek świecą się na zielono

Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> • Po włączeniu PKF08: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ekran LCD włączony <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>No ○ Na ekranie LCD są wyświetlone numer seryjny i długość fali <input type="checkbox"/>Yes <input type="checkbox"/>No ○ Diody LED wszystkich pustych studzienek świecą się na czerwono <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Po włożeniu probówek 12x75 mm do wszystkich ośmiu studzienek: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wszystkie probówki można prawidłowo włożyć <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Diody LED wszystkich studzienek świecą się na zielono <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie
Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

<h3 style="color: #4F81BD;">3.5 Zadanie testowe Weryfikacja temperatury 8-studzienkowego czytnika probówek z funkcją inkubacji Lab Kinetics</h3>	
<input type="checkbox"/> Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____	
Cel	<i>Instrument PKF08 musi utrzymywać temperaturę 37°C ± 1°C.</i>
Warunki konieczne:	<p>Wykalibrowany termometr (zgodnie z dokumentacją w Zadaniu testowym 3.3)</p> <p>Wszystkich osiem probówek płaskodennych 12x65 mm (lub równoważnych, np. niepirogennych probówek 12x75 mm ze szkła borokrzemowego) użytych w TC 3.4, jest doprowadzanych do temperatury PKF08 przez co najmniej 20 minut.</p>
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W czasie 0min, włożyć wykalibrowany termometr do probówki w studzience nr 1, sprawdzając, czy dolna część probówki jest w dostatecznym stopniu zanurzona w wodzie. Począć na ustabilizowanie się odczytów temperatury. 2. Zapisać odczyty temperatury Zmierzone w punkcie Wyniki obserwowane T0min. 3. Powtórzyć tę czynność we wszystkich pozostałych studzienkach. 4. W czasie 60min zmierzyć temperaturę w studzience 5. 5. Zapisać temperaturę Zmierzoną w punkcie Wyniki obserwowane T60min. 6. Sprawdzić, czy zapisane temperatury we wszystkich objętych pomiarami studzienkach w obu punktach czasowych wynoszą 37°C ± 1°C.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura Zmierzona w wszystkich studzienkach w T0min wynosi 37°C ± 1°C. • Temperatura Zmierzona w studzience 5 w T60min utrzymuje się na poziomie 37°C ± 1°C.

Wyniki obserwowane:	Temperatura zmierzona w T0min									
	Studzienka	Temperatura	Studzienka	Temperatura						
	1	°C	5.	°C						
	2	°C	6.	°C						
	3.	°C	7.	°C						
	4.	°C	8.	°C						
Wyniki obserwowane: T60 min	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Temperatura zmierzona w T60min</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Studzienka</td> <td style="text-align: center;">Temperatura</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">°C</td> </tr> </table>				Temperatura zmierzona w T60min		Studzienka	Temperatura	5	°C
Temperatura zmierzona w T60min										
Studzienka	Temperatura									
5	°C									
Nr raportu rozbieżności:										
Zaliczono lub Niezaliczona:										
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)										
Sprawdził(a): (Podpis/Data)										

<h3 style="color: #4F81BD;">3.6 Zadanie testowe Weryfikacja intensywności cyfrowej 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics</h3>	
<input type="checkbox"/> Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____	
Cel	<i>W instrumencie PKF08 intensywność cyfrowa pustych studzienek musi wynosić przy obu długościach fali, 405 i 495 nm, co najmniej 36 000 jednostek intensywności cyfrowej.</i>
Warunki konieczne:	Instrument PKF08 pozostawał włączony przez co najmniej 20 minut. Zadanie testowe TC 3.4 zostało zakończone. Wyjęto z PKF08 wszystkie próbki. Komputer zewnętrzny z Narzędziem weryfikacyjnym BGA wersja: _____
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrument PKF08 podłączyć kablem komunikacyjnym USB do komputera zewnętrznego z zainstalowanym Narzędziem weryfikacyjnym BGA. 2. Uruchoomić Narzędzie weryfikacyjne BGA. 3. Na ekranie głównym w rozwijanym menu Instrument wybrać numer seryjny PKF08. 4. Kliknąć Sprawdzanie AD.

	<p>5. Narzędzie wyświetli w kolumnie A/D zmierzone Wartości cyfrowe dla obu długości fali i dla wszystkich numerów studzienek.</p> <p>6. Zrobić zrzuty ekranów z listą i zapisać jako TC 3.6_1.</p> <p>7. Sprawdzić, czy wszystkie zmierzone Wartości cyfrowe dla obu długości fali i każdego numeru studzienki są ≥ 36.000.</p> <p>8. Kliknąć Zamknij.</p>
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> Jak widać w TC 3.6_1, wszystkie zmierzone Wartości cyfrowe dla każdej długości fali i każdego numeru studzienki wynoszą $\geq 36\ 000$.
Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> Jak pokazano w TC 3.6_1, wszystkie zmierzone Wartości cyfrowe dla obu długości fali i każdego numeru studzienki wynoszą $\geq 36\ 000$: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie
Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

3.7 Ocena i zatwierdzenie

Ten wypełniony **Rozdział 3**, określony jako **Kwalifikacja instalacji 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji**, dokumentuje, że instrument PKF08 przeszedł wszystkie testy wyszczególnionych procedur, do których jest przeznaczony.

Ocena i zatwierdzenie
<p>_____</p> <p>Podpis: Osoba upoważniona i data</p> <p>_____</p> <p>Stanowisko: _____</p> <p>_____</p> <p>Podpis: Osoba upoważniona i data</p> <p>_____</p> <p>Stanowisko: _____</p>

4 Kwalifikacja instalacji oprogramowania BG Analytics®

4.1 Instalacja zadania testowego oprogramowania BG Analytics®	
<p>□ Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____</p>	
Cel:	Oprogramowanie BG Analytics® musi zostać zainstalowane w laboratorium zgodnie z wymaganiami producenta.
Warunki konieczne:	<p>Przygotowany do instalacji komputer spełniający minimalne wymagania systemowe (Win10 64-bit, wersja 1809 lub nowsza) z co najmniej jednym wolnym portem USB.</p> <p>Dedykowane lokalne konto użytkownika Windows®.</p> <p>Pobrać oprogramowanie BG Analytics® z portalu ACC https://portal.acciusa.com zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Instrukcji obsługi BG Analytics® (G_1867), w Rozdziale 1.3, w którym opisano poszczególne etapy rejestracji oraz w Rozdziale 2.5, zawierającym opis instalacji</p>
Piśmiennictwo:	<p>Instrukcja obsługi BG Analytics® (G_1867)</p> <p>Portal oprogramowania ACC https://portal.acciusa.com</p>
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W Wynikach obserwowanych należy potwierdzić, że specyfikacja komputera spełnia minimalne wymagania. 2. W Wynikach obserwowanych należy zapisać identyfikator komputera, identyfikator wyznaczonego użytkownika i wersję oprogramowania BG Analytics®. 3. Zainstalować oprogramowanie BG Analytics® w komputerze - hoście, używając przy tym identyfikatora wyznaczonego lokalnego użytkownika. 4. Po pierwszym uruchomieniu należy przeczytać i zatwierdzić umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania BG Analytics® i dopiero wtedy przejść do ekranu głównego. 5. Zrobić zrzut ekranu głównego BG Analytics®. 6. Zrzut ekranu zapisać jako TC 4.1_1. 7. Sprawdzić, czy na stronie głównej BG Analytics® Home widoczne są Rozpocznij test i Zobacz wyniki. 8. Zamknąć BG Analytics®. 9. W komputerze przejść do Start i kliknąć prawym klawiszem BG Analytics®. Kliknąć Więcej, następnie Przypnij do paska zadań, aby utworzyć ikonę na pasku zadań.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. • Oprogramowanie BG Analytics® zostało prawidłowo zainstalowane. • Tak, jak pokazano w TC 4.1_1, na ekranie głównym BG Analytics® widoczne są Rozpocznij test i Zobacz wyniki.
Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. • Dane komputera: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nr ident. komputera: _____ ○ Nr ident. użytkownika w komputerze - hoście: _____ ○ Wersja oprogramowania BG Analytics®: _____ • Oprogramowanie BG Analytics® zostało prawidłowo zainstalowane.

	<ul style="list-style-type: none"> Jak pokazano w TC 4.1_1, w BG Analytics[®], na stronie Głównej widoczne są Rozpocznij test i Zobacz wyniki: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie
Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	
<h4>4.2 Zadanie testowe Instalacja czytnika kodów paskowych</h4>	
<input type="checkbox"/> Uzasadnienie N/A: wszystkie informacje będą wprowadzane tylko ręcznie (za pomocą klawiatury) Parafka/Data: _____	
Cel:	Gdy jest stosowany czytnik kodów paskowych, BG Analytics [®] musi akceptować odczytnik Fungitell STAT [®] Reagent, wzorzec Fungitell STAT [®] , LRW, APS oraz identyfikatory pacjentów.
Warunki konieczne:	Skonfigurowany czytnik kodów paskowych, spełniający wymagania dostawcy. Program BG Analytics [®] został zainstalowany i jest zamknięty.
Piśmiennictwo:	Instrukcja obsługi BG Analytics [®] (G_1867) Instrukcja obsługi czytnika kodów paskowych
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> Należy zarejestrować opis czytnika kodów paskowych w części Wyniki obserwowane. Zainstalować skonfigurowany skaner w komputerze - hoście, stosując się przy tym do podanej przez producenta procedury instalacji. Uruchomić BG Analytics[®]. Kliknąć Rozpocznij test. Po pojawieniu się ekranu Konfiguracja testu należy zeskanować dostępne kody paskowe (jeśli są). Zrobić zrzut ekranu z wypełnionymi polami na ekranie Konfiguracja testu. Zapisać zrzut ekranu jako TC 4.2_1. Sprawdzić, czy informacje na skanowanych elementach zostały prawidłowo wpisane do BGA.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> Czytnik kodów paskowych spełniający wymagania dostawcy. Czytnik kodów paskowych został prawidłowo zainstalowany. Jak widać w TC 4.2_1, w BG Analytics[®], na ekranie Konfiguracja testu wszystkie zeskanowane czytnikiem kodów paskowych informacje zostały wprowadzone prawidłowo.
Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> Opis czytnika kodów paskowych: _____ Czytnik kodów paskowych spełniający wymagania dostawcy: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie Czytnik kodów paskowych został prawidłowo zainstalowany: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie Jak widać w TC 4.2_1, w oprogramowaniu BG Analytics[®], na ekranie Konfiguracja testu, wszystkie zeskanowane czytnikiem kodów paskowych informacje zostały wprowadzone prawidłowo: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie

Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

4.3 Ocena i zatwierdzenie

Wypełniony **Rozdział 4**, określony jako **Kwalifikacja instalacji oprogramowania BG Analytics®**, dokumentuje, że instrument PKF08 przeszedł pomyślnie wszystkie testy wyszczególnionych procedur, do których jest przeznaczony.

Ocena i zatwierdzenie
<p>_____</p> <p>Podpis: Osoba upoważniona i data</p> <p>_____</p> <p>Stanowisko: _____</p> <p>_____</p> <p>Podpis: Osoba upoważniona i data</p> <p>_____</p> <p>Stanowisko: _____</p>

5 Kwalifikacja działania 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji Lab Kinetics i oprogramowanie BG Analytics®

5.1 Zadanie testowe Weryfikacja przesyłu danych	
□ Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____	
Cel:	Instrument PKF08 musi być w stanie przesyłać dane do BG Analytics® przy podanych długościach fal, 405 nm and 495 nm, w tym dane o temperaturze inkubacji.
Warunki konieczne:	Kwalifikacja instalacji PKF08 i kwalifikacja instalacji IQ BGA zostały przeprowadzone. Instrument PKF08 pozostawał włączony przez co najmniej 20 minut. Wyjęto z PKF08 wszystkie próbki.
Piśmiennictwo	Instrukcja obsługi BG Analytics® (G_1867)
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomić BG Analytics®. 2. Kliknąć Rozpocznij test. 3. BGA wyświetla ekran Weryfikacja instrumentu i przeprowadza 30-sekundowy autotest. 4. Zrobić zrzut ekranu Weryfikacja instrumentu. 5. Zapisać zrzut ekranu jako TC 5.1_1. 6. Sprawdzić, czy BGA wyświetla wszystkie parametry wymienione w punkcie Wyniki oczekiwane. 7. Po zakończeniu autotestu BGA przełącza na ekran Autotest. 8. Zrobić zrzut ekranu Konfiguracja testu. 9. Zapisać zrzut ekranu jako TC 5.1_2. 10. Sprawdzić, czy przesyłany odczyt temperatury wynosi $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> • Jak widać w TC 5.1_1, BG Analytics® wyświetla na ekranie Weryfikacja instrumentu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Trwa autotest... ○ Numer seryjny PKF08 ○ Przesyłany odczyt temperatury ○ Stan: połączono • Jak pokazano w TC 5.1_2, po autotestie oprogramowanie BGA przeszło do ekranu Konfiguracja testu. • Jak pokazano w TC 5.1_2, przesyłany odczyt temperatury wynosi $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.
Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> • Jak widać w TC 5.1_1, BG Analytics® wyświetla na ekranie Weryfikacja instrumentu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Trwa autotest...<input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Numer seryjny PKF08: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Przesyłany odczyt temperatury: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Stan: połączono <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak widać w TC 5.1_2, po autotestie oprogramowanie BGA przeszło do ekranu Konfiguracja testu: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak pokazano w TC 5.1_2, przesyłany odczyt temperatury wynosi $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie
Nr raportu rozbieżności:	

Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

5.2 Zadanie testowe Weryfikacja gromadzenia, zapisywania, analizy i dostarczania wyników testu	
<input type="checkbox"/> <i>Uzasadnienie N/A:</i> _____ <i>Parafka/Data:</i> _____	
Cel:	<p><i>Przy używaniu wraz z testem Fungitell STAT[®] jako pomoc w diagnostyce klinicznej zakażenia grzybami inwazyjnymi, instrument PKF08 i oprogramowanie BG Analytics[®] po zakończeniu testu muszą zbierać, analizować, a po zakończeniu testu zapisywać dane testowe we wbudowanej bazie danych</i></p> <p><i>Pod koniec testu BG Analytics[®] musi wyświetlać na ekranie wynik testu próbki pacjenta.</i></p> <p><i>BG Analytics[®] musi dostarczać możliwy do wydrukowania i eksportowania z jednym identyfikatorem próbki (wynikiem pacjenta) na stronę.</i></p>
Warunki konieczne:	Kwalifikacja instalacji PKF08 i kwalifikacja instalacji IQ BGA zostały przeprowadzone.
Piśmiennictwo	Instrukcja obsługi BG Analytics [®] (G_1867) Fungitell STAT [®] Instrukcja stosowania (PN002603)
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomić BG Analytics[®]. 2. Kliknąć Rozpocznij test. 3. Poczekać na ekran Konfiguracja testu. 4. Wpisać identyfikator użytkownika. 5. Użyć zainstalowanego czytnika kodów paskowych lub w poszczególnych polach wpisać numery partii i terminy ważności (partia wzorca, partia odczynnika, partia APS, partia wody). 6. Wpisać identyfikatory wszystkich 7 (siedmiu) próbek w formie „OQ1”, „OQ2” itp. 7. Zrobić zrzut ekranu Konfiguracja testu. 8. Zapisać zrzut ekranu jako TC 5.2_1. 9. Sprawdzić na ekranie Konfiguracja testu poprawność wszystkich wpisanych danych. 10. Kliknąć Start, aby przejść do ekranu Inkubacja. 11. Przygotować dwie próbki (2) Fungitell STAT[®] STD (STAT STD): <ol style="list-style-type: none"> a. Każdą z nich rozcieńczyć określoną ilością LRW odpowiednio do informacji na etykiecie, worteksować przez 15 sekund i przykryć. b. Do każdej próbki wlać określoną ilość LRW odpowiednio do informacji na etykiecie, worteksować przez 15 sekund i przykryć. 12. Gdy jest widoczny ekran Inkubacja, włożyć do dowolnych studzienek PKF08 obie próbki STAT STD w celu poddania ich 10-minutowej inkubacji. 13. Zrobić zrzut ekranu Inkubacja. 14. Zapisać zrzut ekranu jako TC 5.2_2. 15. Sprawdzić czy stan obu studzienek to „Inkubacja” i czy oba minutniki odliczają 10:00 minut.

	<ol style="list-style-type: none"> 16. W czasie inkubacji dodać do 8 (ośmiu) probówek z testami Fungitell STAT® RGT (STAT RGT) z 300 µl LRW i worteksować każdą probówkę przez nie więcej niż 5 sekund. 17. Gdy stan obu studzienek, w których są próbówki zmieni się na „Inkubacja zakończona”, wyjąć próbówki z PKF08 i połączyć przez odpipetowanie z jednej próbówki całej zawartości i przeniesienie jej do drugiej próbówki. 18. Worteksować probówkę STAT STD z tak pulowaną zawartością przez 15 sekund. 19. Przenieść 75 µl pulowanej zawartości STAT STD do każdej z ośmiu probówek STAT RGT. 20. Worteksować wszystkie osiem probówek STAT RGT nie dłużej niż 5 sekund i przykryć je. 21. W BGA, w odpowiedzi na zachętę do przejścia do zbierania danych, kliknąć Tak. 22. Na ekranie Zbieranie danych włożyć każdą probówkę STAT RGT osobno do PKF08, aby rozpocząć 40-minutowe zbieranie danych. 23. Zrobić zrzut ekranu Zbieranie danych. 24. Zapisać zrzut ekranu jako TC 5.2_3. 25. Sprawdzić czy stan obu studzienek jest „Zbieranie” i czy wszystkie minutniki odliczają 40:00 minut. 26. Począkać na zakończenie testu. 27. Gdy BGA wyświetli „Test zakończony”, kliknąć Wyświetl wyniki. 28. Zrobić zrzut ekranu Wyniki testów BG Analytics®. 29. Zapisać zrzut ekranu jako TC 5.2_4. 30. Sprawdzić, czy na ekranie Wynik testu jest widoczny nagłówek zawierający informacje o teście i wyniki testów próbek OQ1 i OQ2. 31. Kliknąć Drukuj, aby wydrukować cały 7-stronicowy raport. 32. Ponumerować strony od TC 5.2_5 do TC 5.2_11. 33. Sprawdzić, czy BGA wyświetla wszystkie parametry wymienione w punkcie Wyniki oczekiwane. 34. Kliknąć Eksport, aby wyeksportować raport w formacie pliku BG Analytics. Wybrać lokalizację eksportowanego pliku na pulpicie i kliknąć Zapisz. 35. Zrobić zrzut ekranu pulpitu. 36. Zapisać zrzut ekranu jako TC 5.2_12. 37. Sprawdzić, czy plik BG Analytics został prawidłowo wyeksportowany. 38. Otworzyć wyeksportowany plik i wydrukować wyeksportowane raporty. 39. Nadać raportom numery od TC 5.2_13 do TC 5.2_19. 40. Sprawdzić, czy raporty od TC 5.2_13 do TC 5.2_19 są zgodne z raportami TC 5.2_5 do TC 5.2_11. 41. Zamknąć BG Analytics®.
<p>Wyniki oczekiwane:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jak pokazano w TC 5.2_1, na ekran Konfiguracja testu są prawidłowo wyświetlone wszystkie dane. • Jak pokazano w TC 5.2_2, stan obu studzienek to „Inkubacja” i oba minutniki odliczają 10:00 minut. • Jak pokazano w TC 5.2_3, stan obu studzienek to „Zbieranie” i wszystkie minutniki odliczają 40:00 minut. • Jak pokazano w TC 5.2_4 na ekranie Wynik test jest widoczny nagłówek zawierający informacje o teście i wyniki testów próbek OQ1 i OQ2. • Jak pokazano w TC 5.2_5 – TC 5.2_11, każda strona raportu zawiera informacje o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nagłówek z danymi testów ○ Identyfikatora próbek ○ Sekcja próbek:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stan Kontroli jakości: Prawidłowy – Mieści się w zakresie ▪ Wskaźnik: w zakresie 0,75 – 1,2 ▪ Kategoria próbki: nieokreślona lub dodatnia <ul style="list-style-type: none"> • Jak pokazano w TC 5.2_12, raport został wyeksportowany jako plik BG Analytics. • Jak pokazano w TC 5.2_13 do TC 5.2_19, wyeksportowane raporty są zgodne z raportami TC 5.2_5 do TC 5.2_11.
Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> • Jak pokazano w TC 5.2_1, na ekran Konfiguracja testu są prawidłowo wyświetlone wszystkie dane: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak widać w TC 5.2_2 stan dwóch studzienek to „W trakcie inkubacji”, a oba minutniki odliczają 10:00: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak widać w TC 5.2_3, stan obu studzienek to „Zbieranie” i wszystkie minutniki odliczają 40:00 minut: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak widać w TC 5.2_4, ekran Wyniki testów pokazuje nagłówek zawierający dane o teście i wyniki testów próbek OQ1 i OQ2: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak pokazano w TC 5.2_5 – TC 5.2_11, każda strona raportu zawiera informacje o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nagłówek z danymi testów: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Identyfikator ID: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Sekcja próbek: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wynik kontroli jakości: prawidłowy – mieści się w zakresie <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ▪ Wskaźnik: w zakresie 0,75 – 1,2 <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ▪ Kategoria próbki: nieokreślona lub dodatnia <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak pokazano w TC 5.2_12, raport został wyeksportowany jako plik BG Analytics: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak pokazano w TC 5.2_13 do TC 5.2_19, wyeksportowane raporty są zgodne z raportami TC 5.2_5 do TC 5.2_11: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie
Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

5.3 Weryfikacja BG Analytics® Zadanie testowe Raportowanie wyników testu	
□ Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____	
Cel:	<p><i>Jeśli za kontrolę ujemną służy LRW, BG Analytics® musi wyświetlać albo ujemny wynik jakościowy, albo wynik nieprawidłowy.</i></p> <p><i>Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości warunków jakościowych BG Analytics® musi wyświetlić ślad kinetyczny próbki.</i></p>
Warunki konieczne:	Kwalifikacja instalacji PKF08 i kwalifikacja instalacji IQ BG Analytics® została przeprowadzona.

Piśmiennictwo:	Instrukcja obsługi BG Analytics® (G_1867) Fungitell STAT® Instrukcja stosowania (PN002603)
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomić BG Analytics®. 2. Kliknąć Rozpocznij test. 3. Poczekać na ekran Konfiguracja testu. 4. Wpisać identyfikator użytkownika. 5. Użyć zainstalowanego czytnika kodów paskowych lub w poszczególnych polach wpisać numery partii i terminy ważności (partia wzorca, partia odczynnika, partia APS, partia wody). 6. Wpisać identyfikatory próbek dla Próbkę 1, 2 i 3 jako LRW1, LRW2, LRW3. 7. Wpisać identyfikatory próbek dla Próbkę 4, 5 i 6 jako Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3. 8. W Notatkach wpisać następujący tekst: „OQ TC 5.3” 9. Kliknąć Start, aby przejść do ekranu Inkubacja. 10. Przygotować jedną próbkę STAT STD: <ol style="list-style-type: none"> a. Rozcieńczyć STAT SD określoną ilością LRW odpowiednio do informacji na etykiecie, worteksować przez 15 sekund i przykryć. b. Do każdej STAT SD dodać określoną ilość APS odpowiednio do informacji na etykiecie, worteksować przez 15 sekund i przykryć. 11. Przygotowanie Próbkę 1, 2 i 3: <ol style="list-style-type: none"> a. Przenieść 50 µl of LRW do trzech pustych probówek 12x75 mm. b. Dodać do każdej z nich 200 µl APS. c. Mieszać przez worteksowanie przez 15 sekund i przykryć. 12. Na ekranie Inkubowania umieścić STAT STD oraz próbkę 1, 2 i 3 w wyznaczonych studzienkach PKF08 na 10-minutową inkubację. 13. W czasie inkubacji rozcieńczyć zawartość 4 (czterech) probówek STAT RGT 300 µl LRW i worteksować każdą probówkę przez nie więcej niż 5 sekund. Przygotować dodatkowe 3 (trzy) probówki STAT RTG, ale <u>nie</u> rozcieńczać ich (łącznie powinny być cztery probówki STAT RTG, cztery z zawartością rozcieńczoną i trzy nierozcieńczoną). 14. Kiedy stan studzienek zmieni się na „Inkubacja zakończona”, wyjąć wszystkie probówki z PKF08 i worteksować wszystkie probówki przez 5 sekund. 15. Przenieść 75 µl z STAT STD do probówki STAT RGT z rozcieńczoną zawartością. 16. Przenieść po 75 µl z każdej probówki zawierającej Próbkę 1, Próbkę 2 i Próbkę 3 do odpowiednich probówek STAT RGT z rozcieńczoną zawartością. 17. Przenieść 75 µl z STAT STD do każdej z trzech próbek STAT RGT z nierozcieńczoną zawartością. 18. Worteksować pierwsze cztery probówki (z zawartością rozcieńczoną) nie dłużej niż 5 sekund i zakryć. Nie worteksować probówek RGT z nierozcieńczoną zawartością, tylko je przykryć 19. W odpowiedzi na zachętę do przejścia do zbierania danych w BGA kliknąć Tak. 20. Na ekranie Zbieranie danych włożyć każdą probówkę STAT RGT osobno do PKF08, aby rozpocząć 40-minutowe zbieranie danych. 21. Gdy BGA wyświetli „Test zakończony”, kliknąć Wyświetl wyniki. 22. Kliknąć Drukuj, aby wydrukować wygenerowany raport. 23. Oznaczyć raporty jako TC 5.3_1 do TC 5.3_6. 24. Sprawdzić czy w raportach dotyczących próbek o identyfikatorach: LRW1, LRW 2 i LRW3 są wyświetlane parametry tak, jak zdefiniowano w Oczekiwanych wynikach 25. Sprawdzić czy w raportach dotyczących próbek o identyfikatorach: Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 są wyświetlane parametry tak, jak zdefiniowano w Oczekiwanych wynikach 26. Sprawdzić, czy w nagłówku raportu, pod informacja „OQ TC 5.3”, jest wyświetlany wprowadzany tekst.

	27. Zamknąć raport BGA.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> • Tak, jak podano w TC 5.3_1 do TC 5.3_6, w raportach wprowadzony tekst jest wyświetlany w nagłówku, pod informacja „OQ TC 5.3”. • Tak, jak pokazano w TC 5.3_1, TC 5.3_2 i TC 5.3_3, w raportach dotyczących próbek o identyfikatorach: LRW1, LRW2, LRW3 wyświetlana jest jedna z wymienionych poniżej informacji: <ul style="list-style-type: none"> ○ Informacja 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ Sekcja próbek: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status kontroli jakości: prawidłowa - poniżej zakresu ▪ Wskaźnik: Wskaźnik nie został obliczony ▪ Kategoria próbki: ujemna ○ Informacja 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Sekcja próbek: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status kontroli jakości – nie powyżej 0 przy 500 ▪ Wskaźnik: Wskaźnik nie został obliczony ▪ Kategoria próbek: nie podlega obowiązkowi raportowania ○ Wykres krzywa kinetyczna dla próbki jako funkcja (różnica OD (405 – 495 nm) względem czasu (s)) ○ Miejsce przecięcia z osią Y, nachylenie i wartości R określone w zakresie między 1900 a 2400 sekundami • Jak pokazano w TC 5.3_4, TC 5.3_5 i TC 5.3_6, w raportach dotyczących próbek o identyfikatorach: Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 display: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sekcja próbek: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status kontroli jakości – nie powyżej 0 przy 500 ▪ Wskaźnik: Wskaźnik nie został obliczony ▪ Kategoria próbek: nie podlega obowiązkowi raportowania ○ Wykres krzywa kinetyczna dla próbki jako funkcja (różnica OD (405 – 495 nm) względem czasu (s)) ○ Miejsce przecięcia z osią Y, nachylenie i wartości R określone w zakresie między 1900 a 2400
Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> • Jak pokazano w TC 5.3_1 do TC 5.3_6, w raportach wprowadzony tekst jest wyświetlany w raportach w nagłówku, pod Uwagami: „OQ TC 5.3”: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak pokazano w TC 5.3_1, TC 5.3_2 i TC 5.3_3, w raportach dotyczących próbek o identyfikatorach: LRW1, LRW2, LRW3 wyświetlana jest jedna z wymienionych poniżej informacji: <ul style="list-style-type: none"> ○ Informacja 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ Sekcja próbek: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status kontroli jakości: prawidłowy – poniżej zakresu <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ▪ Wskaźnik: Wskaźnik nie został obliczony <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ▪ Kategoria próbki: ujemna <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Informacja 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Sekcja próbek: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status kontroli jakości: nieprawidłowy – nie powyżej 0 przy 500 <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ▪ Wskaźnik: Wskaźnik nie został obliczony <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ▪ Kategoria próbek: nie podlega obowiązkowi raportowania <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Wykres krzywa kinetyczna dla próbki jako funkcja (różnica OD (405 – 495 nm) względem czasu (ów)): <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Miejsce przecięcia z osią Y, nachylenie i wartości R określone w zakresie między 1900 a 2400 sekundami: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie • Jak pokazano w TC 5.3_4, TC 5.3_5 i TC 5.3_6, w raportach dotyczących próbek o identyfikatorach: Non recon 1, Non recon 2, Non recon 3 display: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sekcja próbek: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status kontroli jakości: nieprawidłowy – nie powyżej 0 przy 500 <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wskaźnik: Wskaźnik nie został obliczony <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ▪ Kategoria próbki: nie podlega obowiązkowi zgłaszania <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Wykres krzywa kinetyczna dla próbki jako funkcja (różnica OD (405 – 495 nm) względem czas (ów)): <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ○ Miejsce przecięcia z osią Y, nachylenie i wartości R określone w zakresie między 1900 a 2400 sekundami: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie
Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

5.4 Zadanie testowe Weryfikacja przechowywania danych i możliwości wyszukiwania	
□ Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____	
Cel	<i>BG Analytics® musi stwarzać możliwości przeszukiwania bazy danych według numeru serii standardu, numeru serii odczynnika, identyfikatora próbki i identyfikatora użytkownika.</i>
Warunki konieczne:	Kwalifikacja instalacji PKF08 i kwalifikacja instalacji IQ BG Analytics® zostały przeprowadzone. Zadanie testowe TC 5.3 zostało zakończone.
Piśmiennictwo	Instrukcja obsługi BG Analytics® (G_1867)
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomić BG Analytics®. 2. Kliknąć Wyświetl wyniki. 3. Kliknąć w polu Wyszukaj, aby wyszukać rekord według identyfikatora próbki. Wpisać „LRW1”, jest to identyfikator próbki. 4. Kliknij Znajdź, aby wyświetlić wynik wyszukiwania. 5. Zrobić zrzut ekranu Historia testu. 6. Oznaczyć zrzut ekranu jako TC 5.4_1. 7. Sprawdzić, czy wyświetlany jest wyłącznie wynik dotyczący próbki „LRW1”. 8. Dwukrotnie kliknąć linię próbki „LRW1” i kliknąć Drukuj, aby wydrukować wygenerowany raport. 9. Nadać raportowi nazwę TC 5.4_2. 10. Sprawdzić, czy został wygenerowany raport z tego samego testu, co TC 5.3_1. 11. Zamknąć BG Analytics®.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Jak pokazano w TC 5.4_1, BGA umożliwia wyszukiwanie według identyfikatora Próbkki. ● Jak pokazano w TC 5.4_2 raport próbki „LRW1” jest identyczny jak TC 5.3_1.
Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> ● Jak pokazano w TC 5.4_1, BGA umożliwia wyszukiwanie według identyfikatora Próbkki: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie ● Jak pokazano w TC 5.4_2 raport próbki „LRW1” jest identyczny jak TC 5.3_1: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie
Nr raportu rozbieżności:	

Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

5.5 Zadanie testowe Weryfikacja możliwości sporządzania kopii zapasowej bazy danych	
□ Uzasadnienie N/A: _____ Parafka/Data: _____	
Cel	<i>BG Analytics® musi umożliwić sporządzenie kopii zapasowej bazy danych SQLite.</i>
Warunki konieczne:	Kwalifikacja instalacji PKF08 i kwalifikacja instalacji IQ BG Analytics® zostały przeprowadzone.
Piśmiennictwo	Instrukcja obsługi BG Analytics® (G_1867)
Procedura testowa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomić BG Analytics®. 2. Kliknąć Kopia zapasowa. 3. Wybrać lokalizację na pulpicie komputera-hosta, w której ma zostać zapisana kopia zapasowa. 4. Kliknąć Zapisz pod domyślną nazwą pliku w formacie bgabackup-ROK-MIESIĄC-DZIEŃ jako typ pliku: baza danych BGA. 5. Kliknąć OK, aby potwierdzić Kopia gotowa. 6. Zrobić zrzut ekranu pulpitu. 7. Zapisać zrzut ekranu jako TC 5.5_1. 8. Sprawdzić, czy jest wyświetlony plik o nazwie bgabackup-ROK-MIESIĄC-DZIEŃ. 9. Zamknąć BG Analytics®.
Wyniki oczekiwane:	<ul style="list-style-type: none"> • Jak pokazano w TC 5.5_1, wyświetlany jest plik o nazwie bgabackup-ROK-MIESIĄC-DZIEŃ.
Wyniki obserwowane:	<ul style="list-style-type: none"> • Jak pokazano w TC 5.5_1, wyświetlany jest plik o nazwie bgabackup-ROK-MIESIĄC-DDZIEŃ: <input type="checkbox"/>Tak <input type="checkbox"/>Nie
Nr raportu rozbieżności:	
Zaliczono lub Niezaliczona:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	
Sprawdził(a): (Podpis/Data)	

5.6 Ocena i zatwierdzenie

Ten wypełniony **Rozdział 3**, określony jako **Kwalifikacja działania 8-studzienkowego czytnika próbek z funkcją inkubacji i oprogramowania BG Analytcs[®]**, dokumentuje, że instrument PKF08 przeszedł wszystkie testy wyszczególnionych procedur, do których jest przeznaczony.

Ocena i zatwierdzenie

Podpis: Osoba upoważniona i data

Stanowisko: _____

Podpis: Osoba upoważniona i data

Stanowisko: _____

6 Końcowy raport weryfikacyjny

6.1 Końcowy raport weryfikacyjny	
Cel	Przedstawić omówienie wyników Zadań testowych (TC)
Rozdział 3 Ocena:	Rozdział Nie dot. TC 3.1 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 3.2 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 3.3 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 3.4 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 3.5 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 3.6 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> Uwagi: Rozdział jest zgodny z Wymaganą specyfikacją TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Rozdział 4 Ocena:	Rozdział Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 4.1 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 4.2 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> Uwagi: Rozdział jest zgodny z Wymaganą specyfikacją TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Rozdział 5 Ocena:	Rozdział Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 5.1 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 5.2 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 5.3 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 5.4 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> TC 5.5 Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Nie dot. <input type="checkbox"/> Uwagi: Rozdział jest zgodny z Wymaganą specyfikacją TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Dodatkowe testy:	Nie dot. <input type="checkbox"/> TC ____ Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> TC ____ Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> TC ____ Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> TC ____ Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> TC ____ Zaliczono <input type="checkbox"/> Nie zaliczono <input type="checkbox"/> Uwagi: Dodatkowe testy przyniosły wyniki zgodne z Wynikami oczekiwanymi: TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
System Zaliczono lub Nie zaliczono:	
Przeprowadzone przez: (Podpis/Data)	

Sprawdził(a): (Podpis/Data)	
---------------------------------------	--

6.2 Ocena i zatwierdzenie

Ten wypełniony **Rozdział 6**, określony jako **Końcowy raport dokumentuje, że 8-studzienkowy czytnik próbek z funkcją inkubacji i oprogramowanie BG Analytiss®** przeszedł z wynikiem pozytywnym wszystkie wymienione w Protokole weryfikacji systemu testy i będą odpowiednio działać, kiedy zostaną użyte do celów, do których są przeznaczone.

Ocena i zatwierdzenie	
_____	_____
Podpis: Osoba upoważniona i data	

Stanowisko: _____	
_____	_____
Podpis: Osoba upoważniona i data	

Stanowisko: _____	

7 Załączniki

7.1 Dokumentacja szkoleń

7.2 Obiektywne dowody

7.3 Dodatkowe testy

7.4 Nr raportu dotyczącego rozbieżności

7.5 Raport dotyczący rozwiązywania problemów

7.6 Konserwacja

Dane kontaktowe

Siedziba Spółki

Associates of Cape Cod, Inc.

124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445 USA
Tel: (888) 395-2221 lub (508) 540-3444
Faks: (508) 540-8680
E-mail: custservice@acciusa.com
www.acciusa.com

Zjednoczone Królestwo

Associates of Cape Cod Int'l., Inc.

Deacon Park, Moorgate Road
Knowsley, Liverpool L33 7RX
Zjednoczone Królestwo
Tel: (44) 151-547-7444
Faks: (44) 151-547-7400
E-mail: info@acciuk.co.uk
www.acciuk.co.uk

Europa

Associates of Cape Cod Europe GmbH

Opelstrasse 14
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Niemcy
Tel: (49) 61 05-96 10 0
Faks: (49) 61 05-96 10 15
E-mail: service@acciusa.de
www.acciusa.de

Upoważniony przedstawiciel



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, The Netherlands

Uwaga: każdy poważny incydent, który wydarzy się w związku z użyciem wyrobu należy zgłaszać producentowi i właściwemu urzędowi w państwie członkowskim, w którym przebywa użytkownik oraz/lub pacjent.

Użyte symbole



Indicates compliance with the requirements of all the applicable EU directives



In Vitro Diagnostic Device



Product Model Name



Manufacturer



EU Representative

Historia poprawek

Wersja 2: dodano punkty: Procedura pobierania, Upoważniony przedstawiciel, Historia poprawek i Użyte symbole Zmodyfikowano Rozdział 5.3
Mniej istotne wyjaśnienia i formatowanie